

医療機器の消毒について


株式会社 オートシステム

新型コロナウイルス感染症対策等により、当社医療機器(立位撮影台、臥位撮影台など)を消毒する際は、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムを使用し、以下の点に注意して消毒して下さい。


== 注意点 ==

- ① 前面カバー、パネル、天板などの樹脂やゴム部分にアルコールは使用しないで下さい。
特に、パネルや天板は、アルコールで拭くと白濁や割れが発生することがあります。
- ② 次亜塩素酸ナトリウムをつかまりバー、握り棒、フレームなどの金属部分(鉄、アルミ)に使用した場合は、10分程度たってから水拭きして下さい。
金属がさびる可能性があります。

前面カバー、パネル、天板などの樹脂、ゴム部分は次亜塩素酸ナトリウム、それ以外はアルコール と使い分けて頂くか、次亜塩素酸ナトリウムのみを使用して消毒する場合は、金属部分は10分程度たってから水拭きするのいずれかをお願いします。

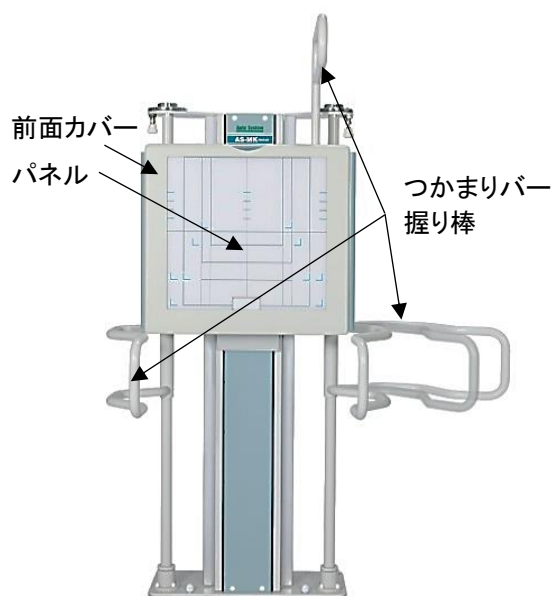

立位撮影台

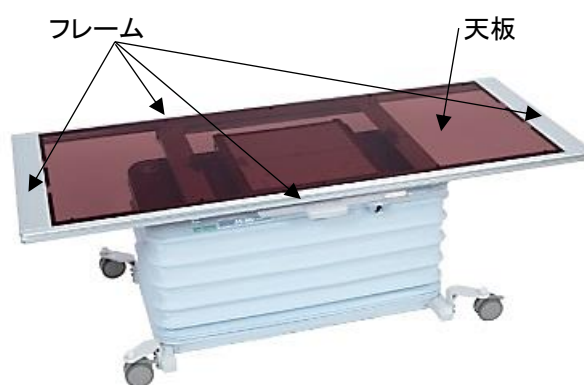

臥位撮影台

東京都感染症情報センター「新型コロナウイルス感染症に関する清掃・消毒について」
<http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/assets/diseases/respiratory/ncov/disin.pdf>

※上記サイトは2020年8月17日時点のものであり更新される場合があります。

